


## EZ-Stabilizer

Der EZ-Stabilizer<sup>®</sup> ist ein stark haftendes medizinisches Pflaster. Es ist leicht anzubringen und bietet gute Hafteigenschaften auf der Haut, die einen sicheren Halt der EZ-IO-Nadel gewährleisten. EZ-Stabilizer ist für EZ-IO-Katheter in den Größen 15 mm, 25 mm und 45 mm und für jeden Punktionsort geeignet.

### Eigenschaften und Vorteile:

- hypoallergenes, selbstklebendes Pflaster
- durchscheinend
- naturlatexfrei
- wasserundurchlässig
- flexibel & bedruckbar

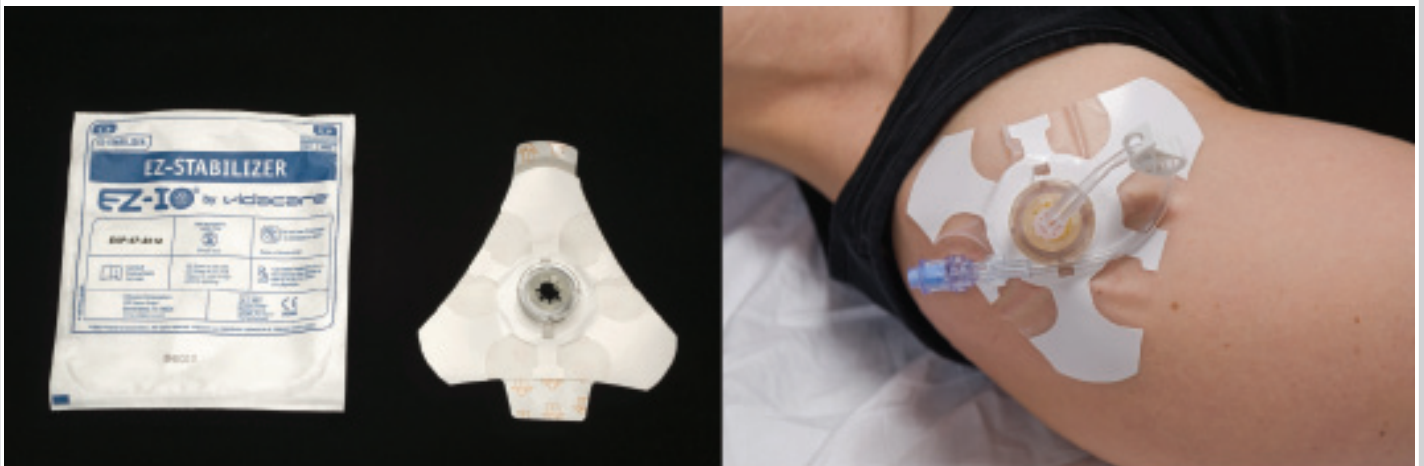

### Zusammensetzung:

Trägerfolie – Polyethylen-Klebefolie  
Verstärkung – durchscheinendes Polyethylen  
Kleber – Acrylat, speziell für medizinische/chirurgische Anwendungen

### Verpackung und Lagerungsempfehlungen:

Der EZ-Stabilizer hat eine Haltbarkeit von vier Jahren.

### Bestellinformationen:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt
9066	EZ-Stabilizer	1 EZ-Stabilizer




Immediate Vascular Access...  
When You Need It.<sup>SM</sup>

# EZ-STABILIZER

# GEBRAUCHSANLEITUNG

## Platzierung

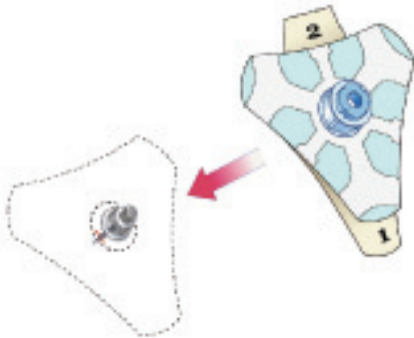

**1.**

- A. EZ-Stabilizer über dem Katheter zentrieren.
- B. Stabilizer auf den Katheter aufsetzen



**2.**

- A. EZ-Connect am Stabilizer anschließen



**3.**


- A. Schutzfolie vom Stabilizer entfernen
- B. Laschen 1 und 2 greifen und Folien vorsichtig abziehen

## Entfernen




**1.**

- A. EZ-Connect lösen

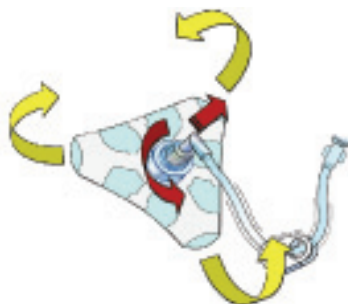

**2.**

- A. Klebepflaster abziehen

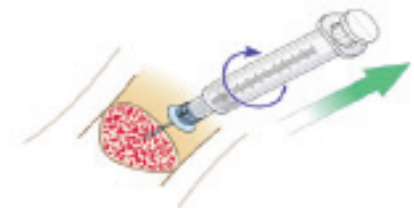

**3.**

- A. Katheter entfernen

Immediate Vascular Access...  
When You Need It.<sup>SM</sup>